

心臟去纖維顫動器 3000

周年覆試評分指引

9/2002

評分細節	給分
<p><b>甲部：心臟去纖維顫動器配件名稱</b></p> <p>a) 考生能說出心臟去纖維顫動器一種配件名稱及位置                      b) 考生能說出心臟去纖維顫動器二種配件名稱及位置                      c) 考生能說出心臟去纖維顫動器三種配件名稱及位置                      d) 考生能說出心臟去纖維顫動器四種配件名稱及位置</p> <p>配件名稱：去纖電擊片密封包裝 / 電導片 / ECG 紙 / 電池 / 後備電池 / 記憶盒 / 模擬器 / 消毒抹紙</p>	<p>1 2 3 4</p>
<p><b>乙部：拆除及安裝配件</b></p> <p>a) 考生能拆除及安裝一種配件                      b) 考生能拆除及安裝二種配件                      c) 考生能拆除及安裝三種配件                      d) 考生純熟完成拆除及安裝三種配件</p> <p>配件：ECG 紙卷 / 電池 / 半自動操作記憶盒 / 咭</p>	<p>1 2 3 4</p>
<p><b>丙部：接駁模擬器進行測試</b></p> <p>a) 考生能接駁模擬器 tester 及開動 heartstart 3000 測試是否正常                      b) 從顯示器或 printer 紙的列印，說出 self-test okay 及</p> <p>i) 顯視的日期，時間                      ii) 無“低電量”指示                      iii) 無“需修理”指示</p>	<p>(每項 1 分計)</p> <p>1 1 1 1</p>
<p><b>丁部：考生示範如何接上心臟去纖維顫動器及進行電擊</b></p> <p>1) 貼上電擊片                      考生除去患者(Annie)上衣</p> <p>a) 貼上一片電擊片連電綫(位置正確)                      b) 貼上二片電擊片連電綫(位置正確)</p> <p>(注意：考生將電綫除下交給考官接駁至 tester)                      考官將 tester 調校至(VF/VT)“心室纖維性顫動/過速”模式)</p> <p>2) 考生能順利按 Heartstart 3000 ”開關制” 接上電源</p> <p>3) 考生能順利按“分折制” 分折及充電，</p> <p>a) 考生祇望著机(Heartstart 3000)按分折制                      b) 考生能視察患者，安全情況下才按分折制</p> <p>4) 叫出“離開傷病者”(共二次，每次四分)</p> <p>a) 考生在第 3 項按分折制前，有叫出“離開傷病者”                      b) 考生在第 5 項按電擊制前，有叫出“離開傷病者”</p> <p>5) 進行電擊</p> <p>a) 考生祇望著机(Heartstart 3000)按電擊制                      b) 考生能視察患者(Annie)，安全情況下才按電擊制</p>	<p>2 4 4 4 4 4 4 8</p>
<p><b>戊：考生自己按鈕進行下列操作</b></p> <p>(注意：考官將 tester 調校至 Sinus“正常竇性心律”的模式)</p> <p>a) 考生按“凍結畫面(Freeze)鈕”及控制回復正常畫面                      b) 考生按“心臟博動聲音輸出鈕”及控制熄掉心臟博動聲音                      c) 考生按“紀錄事項 (Mark Event)鈕”及控制取消                      d) 考生按“編印紀錄紙鈕”編印紀錄紙 及控制停止編印紀錄紙</p>	<p>(每項 2 分計)</p> <p>2 2 2 2</p>
<p><b>限時 8 分鐘內完成(逾時會被停止考試)</b></p> <p>考生未能於限時 8 分鐘內完成                      考生於限時 8 分鐘內完成</p>	<p>0 2</p>